




DOOVE CAREGROEP

Bij storingen kunt u bellen naar

0182 – 624 990

## GEBRUIKSAANWIJZING EUROMAT BASIC

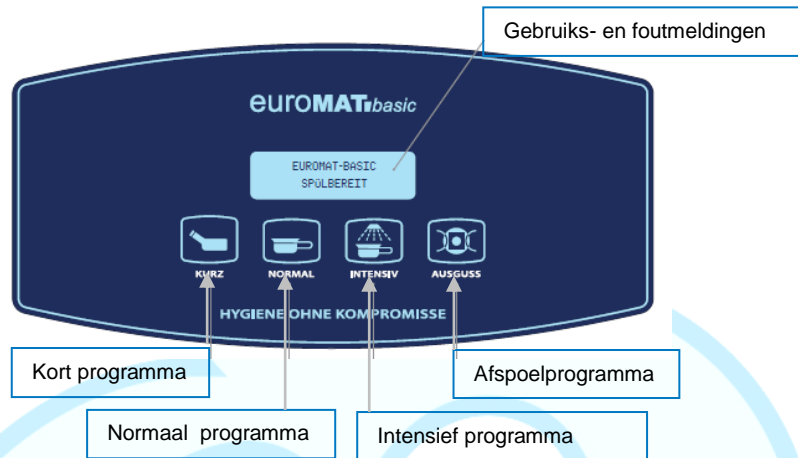

### Ingebruikname


Controleer voor iedere reinigingscyclus

- de reinigingskamer, spoeldouche, roterende spoelarm en afvoer op papierresten en vervuiling
- de soepelheid van de roterende spoelarm
- of de spoelkamerdeur makkelijk te openen en te sluiten is

### Inruimen van de Euromat Basic

Urineflessen worden met de opening naar voren door de linkszijdige houder tot aan de aanslag geschoven.

Ondersteken en toilettemmers worden met de opening naar boven in het rek geplaatst. De deksels van de ondersteken kunnen eveneens in het rek worden geplaatst (handgreep wijst daarbij naar de deur). Bij het sluiten van de deur leegt het vaatwerk zich zelfstandig.

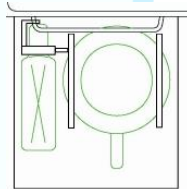

### Deurvergrendeling

De deur is gedurende het totale reinigingsproces vergrendeld en opent zich pas na een succesvolle reiniging, desinfectering en afkoeling. Het gekozen programma wordt in het display weergegeven. Bij het optreden van een fout blijft de deur vergrendeld.

**NB:** Gedurende de desinfecteringsfase wordt de deur iets warmer. Bij aanraking bestaat echter geen verbrandingsgevaar. De handgreep van de deur behoudt ook bij gebruik van het apparaat ongeveer de kamertemperatuur.



Fabrikant:  
**BG-Edelstahl**  
Karlstraße 18  
45739 Oer-Erkenschwick  
Duitsland

DOOVE CAREGROEP

Bij storingen kunt u bellen naar

0182 - 624 990

### Reinigingsprogramma's



**Kort programma;** voor het reinigen en desinfecteren van urineflessen, ondersteken of toilettemmers met vloeibare inhoud. Het programma gebruikt een verkorte spoeltijd, bij een gelijke desinfecteringsprestatie.



**Normaal programma;** Voor het reinigen en desinfecteren van normaal vervuilde ondersteken of toilettemmers. Het programma heeft een gemiddelde spoeltijd bij gelijke desinfecteringsprestatie.



**Intensief programma;** voor het reinigen en desinfecteren van sterk vervuilde ondersteken en toilettemmers. Het programma heeft een verlengde spoeltijd, bij een gelijkblijvende desinfecteringsprestatie.



### Afspoelprogramma

Als de Euromat Basic is voorzien van een afspoelprogramma, dan kan dit programma door middel van deze knop worden aangezet. Het koud waterverbruik is ongeveer 6 liter.

### Gebruiksmeldingen

Tijdens het gebruik kunnen de individuele fasen van de gekozen programma's worden gevolgd aan de hand van de volgende meldingen op het display.

EUROMAT BASIC SPOELKLAAR	De deur van de spoelkamer is gesloten. De bedpanspoeler is gebruiksklaar.
VAATWERK OK A0=645 VAATWERK UITNEMEN	Het programma is succesvol beëindigd. De deur is ontgrendeld en het vaatwerk kan uit de bedpanspoeler worden gehaald.
VERKORT PROGRAMMA VERWARMEN 75° DESINFECTIE: 61°C	Desinfecteringsfase met weergave van de actuele temperatuur/ A0=645 waarde
EUROMAT BASIC INSPECTIE NODIG	Inspectiemelding. De Euromat Basic dient per ommekeer gecontroleerd te worden. Verder gebruik kan echter gewoon zonder beperkingen.