



# DOOVE CARE GROEP

Bij storingen kunt u bellen naar

0182 - 624 990

## GEBRUIKSAANWIJZING FORMIDABEL FIRST

### Handbediening

A1) Diode licht groen op: de bewoner kan scenario's 1,2,3 bedienen.  
Diode licht niet op: bewonersscenario's zijn geblokkeerd.

1) Mobilisatiestand: het ligvlak wordt in de optimale uitstaphoogte van 35/38\* cm gezet.

2) Slaapstand: het bed gaat naar een lighoogte van 23/26\* cm en zorgt voor een goede valpreventie.

3) Comfort ligstand: de rug- en onderbeensteun worden in een schuine positie geplaatst.

4) Verzorgstand: het bed beweegt naar de hoogste stand van 80/83\* cm en het ligvlak wordt horizontaal ingesteld.

5/6) Positie rugleuning omhoog/omlaag.

A2) Diode licht groen op: de verzorgingsmodus is geactiveerd, alle functies zijn vrij (behalve de Trendelenburg stand).


7/8) Positie beenverstelling omhoog/omlaag.

9/10) Hoogtepositie omhoog/omlaag.

11) Verlichting onder het bed (optioneel).

12) Trendelenburg stand; alleen beschikbaar in ingeschakelde verzorgmodus II. Het minimaal 12° gekantelde ligvlak dient om de benen hoger te leggen dan het hoofd.

A3) Diode licht groen op: functie 12 is geactiveerd.

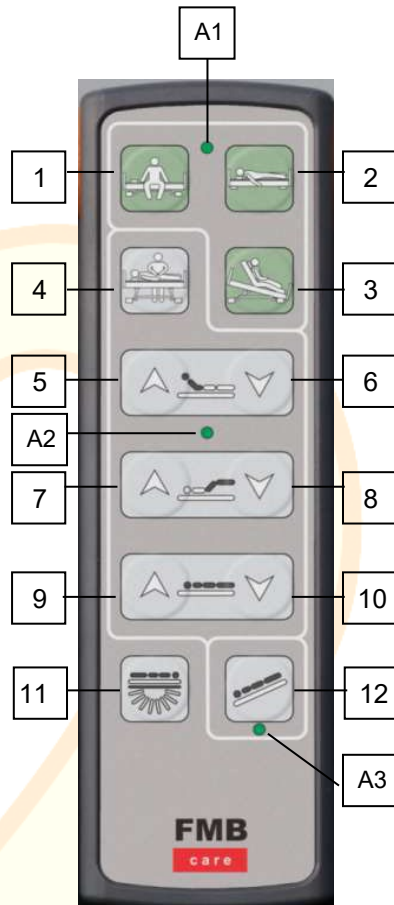

\* hoogte afhankelijk van de grootte van de loopwielen; 50 mm, 75 mm of 100 mm.

CE Fabrikant:  
FMB Care GmbH  
Am Schlinge 8  
33154 Salzkotten  
Duitsland

# DOOVE CARE GROEP

Bij storingen kunt u bellen naar

0182 - 624 990


### Blokkeer/deblokkeerfuncties (op de achterkant van de handbediening)

I = Verzorgmodus 1: alle functies 1-11 zijn vrij, functie 12 (Trendelenburg) is geblokkeerd.

II = Verzorgmodus 2: alle functies kunnen worden bediend.

I = Gebruikersmodus: de scenariofuncties (1,2 en 3) kunnen worden bediend.

II = Blokkeermodus: alle functies zijn geblokkeerd, alleen de verlichting onder het bed kan worden in-en uitgeschakeld.

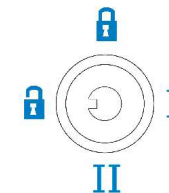

### Remmen en rijden

Het bed is verrijdbaar op iedere hoogte en in iedere positie. Het vastzetten van het bed vindt per as plaats met een 2 + 2 systeem of optioneel met een centraal remsysteem voor 4 wielen. De rempedalen bij de wielen zijn van elke kant goed bereikbaar. Door de remhefboom naar beneden te drukken worden de wielen geblokkeerd.

### Mogelijke storingen

Indien de Formidabel First niet werkt, raadpleeg dan onderstaande tabel om de storing op te sporen en te verhelpen. Wanneer u het probleem niet kunt verhelpen, neem dan contact op met Doove Care Groep.

PROBLEEM	MOGELIJKE OPLOSSING
Het bed werkt niet	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controleer of het netsnoer goed aangesloten is</li> <li>- Controleer of er spanning op het stopcontact zit</li> <li>- Controleer of de handbediening of aandrijving defect is; neem contact op met Doove Care Groep</li> <li>- Controleer of de schakelaar op de achterkant van de handbediening niet op "vergrendeld" staat</li> </ul>
De zijhekken kunnen niet goed versteld worden	- Controleer de bewegende delen en verwijder vreemde voorwerpen
Wielen remmen of draaien niet	- Verwijder vreemde voorwerpen