



DOOVE CARE GROEP

Bij storingen kunt u bellen naar

0182 - 624 990

GEBRUIKSAANWIJZING FORMIDABEL PRO

Handbediening (scan de code voor een instructievideo)



A1) Diode licht groen op: de bewoner kan scenario's 1,2,3 bedienen.
Diode licht niet op: bewonersscenario's zijn geblokkeerd.

1) Mobilisatiestand: het ligvlak wordt in de optimale uittaphoogte van 35 cm gezet.

2) Slaapstand: het bed gaat naar een lighoogte van 25 cm en zorgt voor een goede valpreventie.

3) Comfort ligstand: de rug- en onderbeensteun worden in een schuine positie geplaatst.

4) Verzorgstand: het bed beweegt naar de hoogste stand van 81 cm en het ligvlak wordt horizontaal ingesteld.

5/6) Positie rugleuning omhoog/omlaag.

A2) Diode licht groen op: de verzorgingsmodus is geactiveerd, alle functies zijn vrij (behalve de Trendelenburg stand).

7/8) Positie beenverstelling omhoog/omlaag.


9/10) Hoogtepositie omhoog/omlaag.

11) Trendelenburg stand; alleen beschikbaar in ingeschakelde verzorgmodus. Het minimaal 12° gekantelde ligvlak dient om de benen hoger te leggen dan het hoofd.

A3) Diode licht groen op: functie 11 is geactiveerd.

Blokkeer/deblokkeerfuncties (scan de code voor een instructievideo)

Afhankelijk van de lichamelijke en mentale staat van de persoon die het verpleegbed nodig heeft, kunnen functies geblokkeerd of vrijgegeven worden door de magneetsleutel aan de zijkant van de handbediening te schuiven.

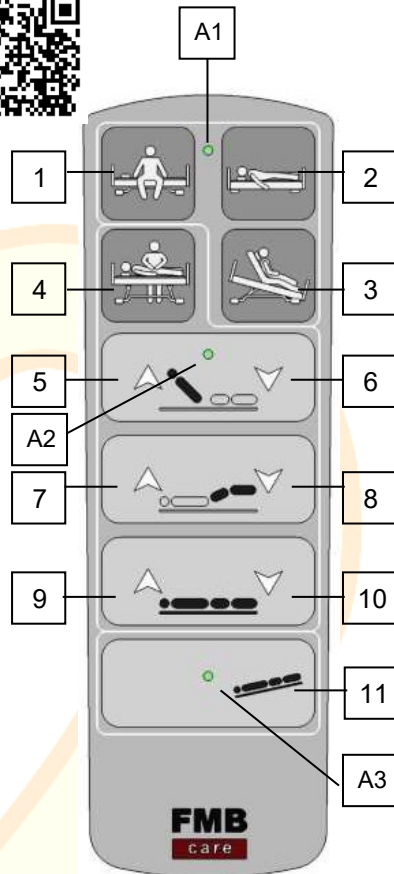

CE Fabrikant:
FMB Care GmbH
Am Schlinge 8
33154 Salzkotten
Duitsland

DOOVE CARE GROEP

Bij storingen kunt u bellen naar

0182 - 624 990

Remmen en rijden

Het bed is verrijdbaar op iedere hoogte en in iedere positie. Het vastzetten van het bed vindt per as plaats met een 2 + 2 systeem of optioneel met een centraal remsysteem voor 4 wielen. De rempedalen bij de wielen zijn van elke kant goed bereikbaar. Door de remhefboom naar beneden te drukken worden de wielen geblokkeerd.



Bedverlenging en bedhekken

Het bed kan aan de voetzijde tot 220 cm verlengd worden. Het verlengen van het ligvlak mag alleen door bevoegd vakpersoneel worden uitgevoerd. Voor de ombouw naar een bedverlenging kunnen de bedhekken gedemonteerd en door langere vervangen worden.

Instructievideo's bediening bedhekken

Met twee handen

Met één hand

Instructievideo reset handbediening



Mogelijke storingen

Indien de Formidabel Pro niet werkt, raadpleeg dan onderstaande tabel om de storing op te sporen en te verhelpen. Wanneer u het probleem niet kunt verhelpen, neem dan contact op met Doove Care Groep.

PROBLEEM	MOGELIJKE OPLOSSING
Het bed werkt niet	- Controleer of het netsnoer goed aangesloten is - Controleer of er spanning op het stopcontact zit - Controleer of de handbediening of aandrijving defect is; neem contact op met Doove Care Groep - Controleer of de schakelaar op de achterkant van de handbediening niet op "vergrendeld" staat
De zijhekken kunnen niet goed versteld worden	- Controleer de bewegende delen en verwijder vreemde voorwerpen
Wielen remmen of draaien niet	- Verwijder vreemde voorwerpen