



# DOOVE CARE GROEP

Bij storingen kunt u bellen naar

0182 - 624 990

## GEbruIKSAANWIJZING COLONNA DOUCHEBRANCARD

### Hoofdsteen


Aan beide zijden van de douchebrancard bevindt zich halverwege een hendel voor de hoofdsteen. De plek is aangegeven met een sticker.



**Omhoog:** Duw met één hand de hendel omhoog tegen het ligvlak en trek met uw andere hand het handvat van de hoofdsteen omhoog. Als de gewenste hoogte is bereikt, kan de hendel worden losgelaten en daarna pas de hoofdsteen.




**Omlaag:** Duw met één hand de hendel omhoog tegen het ligvlak aan en duw met uw andere hand het handvat van de hoofdsteen omlaag. Als u de gewenste hoogte heeft bereikt, dan kunt de hendel loslaten en daarna de hoofdsteen.

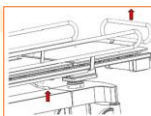

### Zijhekkken


**Omhoog:** Trek het zijhek omhoog totdat het vastklikt. Controleer of ze vastzitten.

**Omlaag:** Aan weerszijde van de douchebrancard zitten twee zwarte hendels. Pak met één hand het veiligheidshek vast en knijp met de andere hand beide zwarte hendels naar elkaar toe en laat het veiligheidshek zakken.

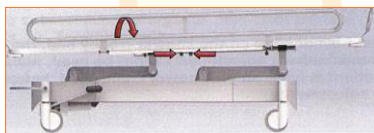

### Verplaatsen van de douchebrancard

Het rempedaal werkt centraal op de 4 wielen en kan in 3 standen gezet worden.

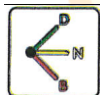

Pedaal omhoog: 3 wielen kunnen vrij roteren, 1 geeft richting aan

Pedaal neutraal: alle wielen kunnen vrij roteren

Pedaal omlaag: alle wielen zijn vergrendeld.

**Rijden met de douchebrancard** → trek de zijhekkken omhoog en vergrendel het richtingswiel door het rempedaal omhoog te zetten.

**Douchebrancard verplaatsen naar links of rechts** → alle wielen dienen vrij te roteren. Ze het rempedaal vrij in de neutrale positie.

**Douchebrancard tijdens gebruik** → blokkeer de wielen door het rempedaal naar beneden te duwen. NB: de wielen mogen in geblokkeerde stand nooit naar binnen gericht te zijn.

**CE** Fabrikant:  
**TIMO d.o.o.**  
Vipavska cesta 4i  
5270 AJDOVŠČINA  
Slovenië


# DOOVE CARE GROEP

Bij storingen kunt u bellen naar

0182 - 624 990

### Elektrische bediening

Met de bovenste knoppen op de afstandsbediening kan het liggedeelte omhoog en omlaag bewogen worden. Met de onderste knoppen kan de (Anti) Trendelenburgposities ingesteld worden. Zorg er dan wel voor dat de douchebrancard op de rem staat en de zijhekkken vergrendeld zijn.

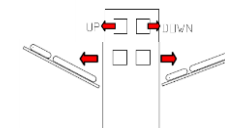

### Opladen van de accu

Wanneer er een geluidssignaal klinkt moet de accu opgeladen worden. De muuroplader heeft twee lichtsignalen; groen betekent dat de lader is aangesloten op stroom en geel betekent dat de batterij bezig is met opladen. Wanneer de batterij helemaal vol is, gaat het gele licht vanzelf uit. Het opladen duurt +/- 4 uur. Voor de eerste ingebruikname dient de accu 12 uur opgeladen te worden.

### Mogelijke storingen

Storing	Oorzaak	Mogelijke oplossing
De Trendelenburg – Anti Trendelenburgstand werkt niet	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. De accu is leeg of niet op de juiste wijze aangesloten</li> <li>2. De handbediening werkt niet goed</li> <li>3. De motor is kapot</li> <li>4. Kapotte stroomkabel</li> <li>5. Verkeerde controlebox</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laad de accu op of neem contact op met de technische dienst van Doove Care Groep.</li> <li>2. &amp; 3 &amp; 5. Neem contact op met de technische dienst van Doove Care Groep.</li> <li>4. Controleer of alle kabels op de juiste wijze zijn aangesloten of neem contact op met de technische dienst van Doove Care Groep.</li> </ol>
De hoofdsteen wil niet omhoog, ook al wordt de hendel ingeduwd	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zeer grote belasting op de hoofdsteen</li> <li>2. Schade aan de gasveer of hendel</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verminder het gewicht op de hoofdsteen en probeer het opnieuw.</li> <li>2. Neem contact op met de technische dienst van Doove Care Groep</li> </ol>
De remblokkering werkt niet	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schade aan de wielen</li> <li>2. Schade aan het rempedaal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. &amp; 2. Neem contact op met de technische dienst van Doove Care Groep.</li> </ol>
Het ligvlak gaat niet omhoog	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. De accu is leeg of niet op de juiste wijze aangesloten</li> <li>2. De handbediening werkt niet goed</li> <li>3. De motor is kapot</li> <li>4. Kapotte stroomkabel</li> <li>5. Verkeerde controlebox</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laad de accu op of bel de technische dienst van Doove Care Groep.</li> <li>2. &amp; 3. Neem contact op met de technische dienst van Doove Care Groep.</li> <li>4. Controleer of alle kabels op de juiste wijze zijn aangesloten of neem contact op met de technische dienst van Doove Care Groep.</li> <li>5. Neem contact op met de technische dienst van Doove Care Groep.</li> </ol>

Indien de douchebrancard niet werkt, raadpleeg dan bovenstaande tabel om de storing op te sporen en te verhelpen. Wanneer u aan de hand van bovenstaande informatie het probleem niet kunt verhelpen, neem dan contact op met Doove Care Groep.