



## DOOVE CARE GROEP

Bij storingen kunt u bellen naar



0182 - 624 990

### GEBRUIKSAANWIJZING TOBA DOUCHESTOEL

#### Plaatsnemen van cliënten op de TOBA

De TOBA beschikt over een voetensteun die volledig tot op de grond komt. Mobile cliënten kunnen daardoor eenvoudig plaatsnemen op de TOBA, zonder dat het personeel hoeft te bukken om de voetensteun op te klappen. De voetensteun kan eenvoudig in hoogte worden versteld om een optimale zitpositie te bereiken voor elke individuele cliënt. De TOBA is lifttoegankelijk waardoor niet mobiele cliënten eenvoudig in de stoel geplaatst kunnen worden. Ook een zijdelingse transfer vanuit bed of (rol)stoel is mogelijk, omdat de armléuningen van de TOBA opklapbaar zijn.


#### Afstandsbediening

Het heffen en kantelen van de cliënt vindt plaats via de afstandsbediening. Op de bovenste toetsen wordt door middel van pijlen  aangegeven of de TOBA in opwaartse of neerwaartse richting beweegt. De tweede rij toetsen regelt de zitpositie van de patiënt; rechte zithouding of kantelstand. 

**Belangrijk:** indien u tijdens het gebruik een groen lampje ziet branden op de afstandsbediening of de afstandsbediening "piept", dan moet u direct de wisselaccu vervangen. Indien u dit niet doet, beschadigt u de wisselaccu en gaat de levensduur van de wisselaccu snel achteruit.

#### Controlebox

De controlebox bevindt zich aan de linkerachterkant van de TOBA. Op de box bevindt zich de noodstop, een Emergency knop en een display die weergeeft of de wisselaccu nog voldoende geladen. Onder aan de controlebox bevinden zich verder de aansluitbussen voor de afstandsbediening en de motoren.

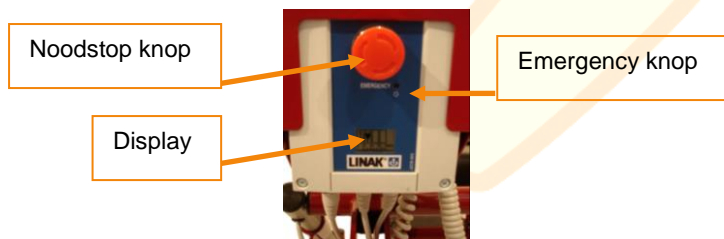

## DOOVE CARE GROEP

Bij storingen kunt u bellen naar

0182 - 624 990

#### Noodstop

Bij een gevaarlijke situatie moet de noodstop worden ingedrukt. Deze knop bevindt zich op de controlebox. Na het indrukken van deze knop stopt de motor direct, waardoor het heffen of kantelen direct wordt gestopt.

Om de stopsituatie weer op te heffen, dient de noodstop naar rechts gedraaid te worden, totdat de knop er vanzelf weer uitspringt. De motor kan dan weer worden bediend.

#### Emergency-knop

Om gebruik te maken van de Emergency-knop op de controlebox, dient deze met een smal voorwerp (bijvoorbeeld een balpen) te worden ingedrukt. De motor beweegt dan naar boven of beneden. Deze knop kan bijvoorbeeld worden gebruikt wanneer de afstandsbediening beschadigd is.

#### Opladen van de wisselaccu

De wisselaccu wordt vanuit de fabriek voorgeladen afgeleverd. Voor de eerste ingebruikname van de TOBA moet de wisselaccu echter tenminste 10 uur achtereen worden opgeladen. Daarna minimaal eenmaal per week tenminste 10 uur achtereen, ook als TOBA gedurende langere tijd niet wordt gebruikt. Voor het opladen dient altijd gebruik te worden gemaakt van de bijgeleverde originele oplader.

#### Mogelijke storingen

Storing TOBA	Mogelijke oplossing
Heft of kantelt niet	<ul style="list-style-type: none"><li>- Noodstop uittrekken</li><li>- Stekkers controleren of deze goed vastzitten in de controlebox</li><li>- Wisselaccu vervangen</li><li>- Motor(en) vervangen</li><li>- Afstandsbediening op schade controleren en eventueel vervangen</li><li>- Controlebox vervangen door een nieuwe</li></ul>
Wisselaccu laadt niet op	<ul style="list-style-type: none"><li>- Controleren of de oplader in orde is</li><li>- Wisselaccu controleren of omwisselen</li></ul>
De TOBA beweegt langzaam op en neer	<ul style="list-style-type: none"><li>- Wisselaccu bijladen of vervangen</li></ul>

Indien de TOBA niet werkt, raadpleeg dan bovenstaande tabel om de storing op te sporen en te verhelpen. Wanneer u aan de hand van bovenstaande informatie het probleem niet kunt verhelpen, neem dan contact op met Doove Care Groep.