

DOOVE CARE GROEP

QUATTRO PLUS



1. Aan/ uit knop
2. Comfortregeling (zacht, medium, hard)
3. Display
4. Mute knop om alarmmelding te verwijderen
5. Max. inflate: matras vult zich maximaal gedurende 15 minuten
6. Transportfunctie: zorgt ervoor dat het matras bij transport gevuld blijft.



Druk op de knop  (Maximale vulling).

Wacht tot het matras volledig gevuld is en draai dan de luchtslang, die in de zijkant van de pomp zit, tegen de klok in en haalt hem eruit. Haal de stekker uit het stopcontact en het bed is klaar voor transport.

LET OP: sluit na transport de luchtslang weer aan, stop de stekker in het stopcontact en zet de pomp weer aan. Anders loopt het matras langzaam leeg.



CPR

Door aan deze knop te draaien kan het matras snel ontlucht worden.

