




GEBRUIKSAANWIJZING SPECTRA PLAFONDLIFT

De Spectra HS200 is een vaste plafondlift, bedoeld voor het tillen en verplaatsen van personen.

Handbediening

De handbediening van de plafondlift heeft 4 knoppen:

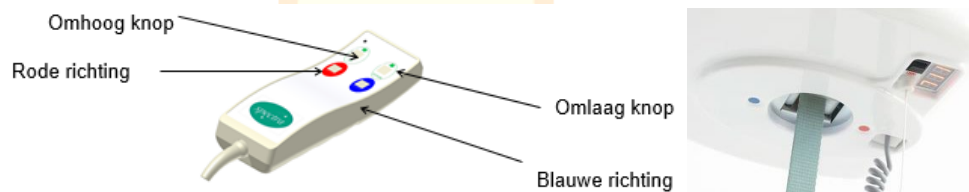

Noodstop en nooddaling

De Spectra plafondlift is standaard uitgerust met een noodstop en een nooddalingsfunctie.

Rode noodstopkoord: In het geval de plafondlift een storing heeft, kan door aan het **rode** koord te trekken de plafondlift worden uitgezet. Om de plafondlift weer in werking te krijgen, dient nogmaals aan het rode koord getrokken te worden.



Witte nooddalingskoord: Als de lift niets meer doet, dan kan de lift alsnog omlaag worden gebracht door aan het **witte** koord te trekken.

Opladen van de batterij

De HS 200 plafondliftcassette heeft 2 manieren om de batterij op te laden, afhankelijk van welke oplaadmogelijkheid is geïnstalleerd:

- Automatisch opladen: plafondlift zal zich automatisch opladen indien nodig.
- Opladen in het oplaadstation: de plafondlift moet aan het eind van het railsysteem worden geplaatst, waar de oplader zich bevindt. Vervolgens kunnen de batterijen worden opgeladen.



Als de batterij oplaadt is in het display een lijn zichtbaar



Wanneer het batterijniveau laag is verschijnt "bAt" in het display. De lift kan dan nog ongeveer 3-6 heffingen.



Raadpleeg onderstaande tabel als de plafondlift storing geeft. Neem indien het probleem hierna niet opgelost is contact op met Doove Care Groep.

FOUTMELDING	MOGELIJKE OORZAAK/ OPLOSSING
Handbediening reageert niet	<ul style="list-style-type: none"> - Noodstop is geactiveerd. Trek 1 keer aan het rode koord en probeer of de lift nu wel werkt. - Batterij ontladen. Breng de lift naar het laadstation en controleer op de laadindicatoren op de cassette. Controleer bij een automatisch oplaadsysteem of het groene controle lampje brandt. Zo niet, controleer of de stroom niet is afgezet. - Controleer bij infrarode afstandsbediening of de batterijen vervangen moeten worden.
Het tiljuk gaat omhoog als ik de knop voor omlaaggaan indruk en vice versa.	<ul style="list-style-type: none"> - Probleem met de limietknop. Maak een afspraak met de technische dienst voor controle.
Afstandsbediening laat onderbroken geluidssignaal horen.	<ul style="list-style-type: none"> - Batterij bijna leeg.
In het display van de plafondlift verschijnt een "schroefsleutel"-symbool en er klinkt een geluidssignaal bij indrukken van een knop op handbediening.	<ul style="list-style-type: none"> - De lift heeft 1000 tilbewegingen gemaakt en heeft een onderhoudsbeurt nodig. De lift kan gewoon gebruikt worden en maak een afspraak voor een onderhoudsbeurt.